



nal von minden Drug-Screen® Pregabalin Schnelltest

Schnelltest zur Urinanalyse · Cut-off: 500 ng/mL

Pregabalin ist ein Antikonvulsivum, das zur Behandlung von epileptischen Anfällen, neuropathischen Schmerzen und generalisierten Angststörungen zugelassen ist und ist hauptsächlich unter dem Handelsnamen Lyrica bekannt. Seine beruhigende und erholsame Wirkung macht es nicht nur für Patienten attraktiv, die ihre Symptome durch die Einnahme lindern möchten, auch Personen mit riskantem Substanzkonsum in der Vorgeschichte sind besonders anfällig für Pregabalin-Missbrauch.

Pregabalin reguliert zielgerichtet überaktive Nerven und hemmt die elektrische Signalweiterleitung, die beispielsweise von beschädigten Nerven ausgeht. Somit wird die Schmerzempfindlichkeit herabgesetzt. Treibkraft für den missbräuchlichen Einsatz, ist nicht nur die beruhigende und euphorisierende Wirkung von Pregabalin, sondern auch die Tatsache, dass es die zentral dämpfenden Wirkungen anderer Wirkstoffe verstärkt, wie beispielsweise bei Beruhigungs- oder Schlafmitteln auf Benzodiazepinbasis oder Opiaten bzw. Opioiden. Infolgedessen ist eine alleinige Abhängigkeit von Pregabalin selten. Neben den potenziell schädlichen Nebenwirkungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, eine psychische Abhängigkeit zu entwickeln. Das Medikament sollte also keinesfalls unterschätzt werden.


Die Verschreibungszahlen von Pregabalin nehmen deutlich zu und damit auch der Missbrauch. Aus diesem Grund ist die Einführung des nal von minden Drug-Screen® Pregabalin-Tests eine wichtige Ergänzung unseres Drogenschnelltest-Sortiments.

Der nal von minden Drug-Screen® Pregabalin (PGB) Schnelltest ist ein kompetitiver Immunoassay zur qualitativen Bestimmung von Pregabalin im humanen Urin bei einem Cut-Off-Wert von 500 ng/mL. Er kann als Hilfsmittel zur Einleitung oder Überwachung von therapeutischen Maßnahmen verwendet werden. Als *in-vitro* Diagnostikum für den professionellen Gebrauch liefert der Test ein visuelles und vorläufiges analytisches Resultat.


Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Nachweiszeiten: 1-3 Tage
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Schnelle & verlässliche Testergebnisse in nur 5-8 Minuten
- ✓ Mindestens 12 Monate haltbar
- ✓ Auch in Multitest-Kombinationen integrierbar
- ✓ In Übereinstimmung mit DIN EN ISO 15189 für medizinische Laboratorien sind unsere Schnelltests für die Readerbasierte Auswertung als barcodierte Tests erhältlich

Testdurchführung

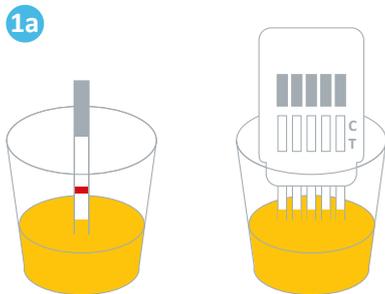

Tauchen Sie den Teststreifen **15-30 Sekunden** bis zur entsprechenden Markierung (MAX) in den Urin. Die Flüssigkeit darf dabei die MAX Markierung nicht überschreiten.

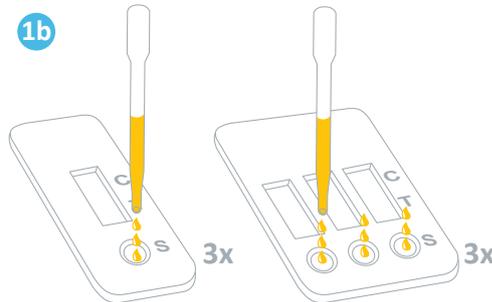

Geben Sie in jede Vertiefung für die Probenaufnahme **3 Tropfen** Urin (ca. 150 µl Urin). Achten Sie darauf, dass kein Urin direkt auf das Reaktionsfeld gelangt.



Lesen Sie das Ergebnis der Drogentests **nach 5 min** ab. Bestätigen Sie positive Ergebnisse nochmals nach 8 min.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Testauswertung



Pregabalin

Schnelltest zum Nachweis von Pregabalin im Urin

Produkt	Format	Probenmaterial	Cut-Off	Abrechnung	Bestell-Nr.	Packungsgröße	Preis/Stück
Drug Screen® PGB 500 ng/mL	Teststreifen	Urin	500 ng/mL	EBM 32030 (0,50 €) GOÄ 4182 (14,57 €)	101067	50 Stück einzeln verpackt	2,99 €
Drug Screen® PGB 500 ng/mL	Testkassette	Urin	500 ng/mL	EBM 32030 (0,50 €) GOÄ 4182 (14,57 €)	102067	30 Stück einzeln verpackt	2,99 €

Rev01.01/XX0702de0009
Rev01.02/DE02de00033

Gerne beantwortet unser **Vertriebsteam** alle Ihre Fragen unter
Tel.: +49 941 29010-0 oder +49 2841 99 820-0 und per E-Mail vertrieb.abt@nal-vonminden.de

We help you care!

Schnelltests

Labordiagnostika

Laborservice

Beratung & Service